

NEO SHIELD

抗がん剤投与クローズドシステム ネオシールド

カチッ! と簡単ワンタッチ



独自技術で高い**閉鎖性**を実現



接続ポイントは**1か所**^{*}のみの簡単操作



シンプルな構成で作業効率もアップ

カチッ!
↑


安心・簡単・効率的な抗がん剤投与を実現する閉鎖式システム

投与使用手順


Y字タイプ



前投薬を従来の輸液セットと同じように投与します。

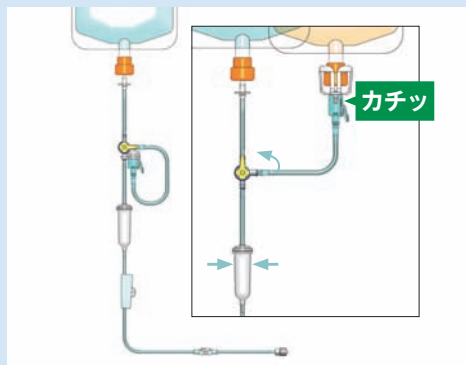


閉鎖式レバーロックを調製済みのバッグに接続し、コックを切替えます。点滴筒のポンピングによりチューブをプライミングします。

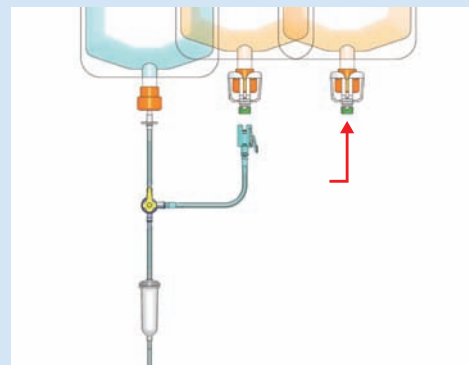


1剤目の抗がん剤投与の後、2剤目以降の投与がある場合は、閉鎖式レバーロックの部分で付け替えをおこないます。


シングルタイプ

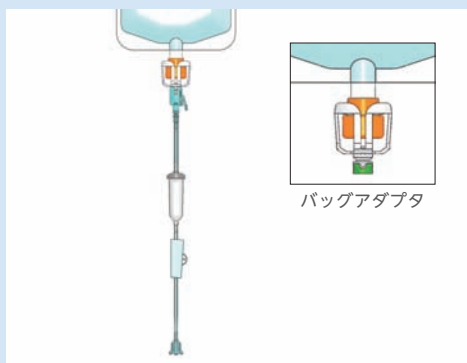

ネオシールドバッグアダプタを接続した生理食塩水などを用いて、プライミングをおこないます。

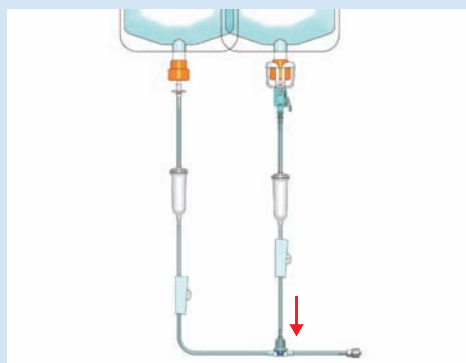

ネオシールド輸液セットをメインラインの混注口に接続し、調製済みのバッグに付け替えます。

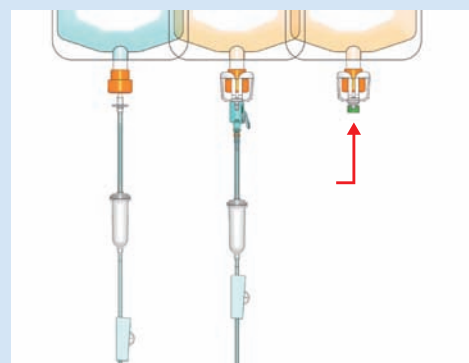

1剤目の抗がん剤投与の後、2剤目以降の投与がある場合は、閉鎖式レバーロックの部分で付け替えをおこないます。

規格一覧

販売名：ネオシールド輸液セット




	規格番号	JANコード	ポンプ用	フィルタ付	混注口 プラネクタ®	先端形状	
						フリーロック	PNロック
ダブルタイプ	JY-NP322F3NS	4987494262434			2個	●	
	JY-NP322P3NS	4987494262441			2個		●
	JY-NX320FNS	4987494267200			-	●	
	JY-NFP322F3NS	4987494265732		●	2個	●	
	JY-NFP322P3NS	4987494265749		●	2個		●
	JP-NP322F3NS	4987494262458	●		2個	●	
	JP-NP322P3NS	4987494262465	●		2個		●
	JP-NX320FNS	4987494267217	●		-	●	
	JP-NFP322F3NS	4987494265756	●	●	2個	●	
	JP-NFP322P3NS	4987494265763	●	●	2個		●
シングルタイプ	JY-NXL23FNS	4987494263127			-	●	
	JY-NXL23PNS	4987494263165			-		●
	JY-NFL20F2NS	4987494263141		●	-	●	
	JY-NFL20P2NS	4987494263172		●	-		●
	JP-NXL23FNS	4987494261758	●		-	●	
	JP-NXL23PNS	4987494261741	●		-		●
	JP-NFL20F2NS	4987494267897	●	●	-	●	
	JP-NFL20P2NS	4987494261789	●	●	-		●

販売名 ネオシールド輸液セット 医療機器認証番号 225AABZX00017000

梱包単位 10本×10箱=100本 滅菌方法 エチレンオキサイド滅菌

※プラネクタ：株式会社ジェイ・エム・エスのスプリットセプタム型閉鎖式注入ポートの名称です。

閉鎖式レバーロックのしくみ

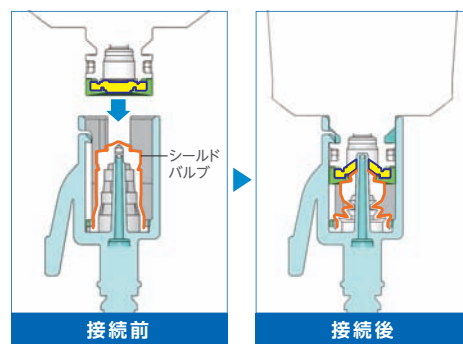

挿入部に先端を保護するシールドバルブを採用。専用の混注口に接続することで、付け外しのときにも閉鎖状態を維持します。



製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
〒730-8652 広島市中区加古町12-17
<http://www.jms.cc/>