



安心、そしてより安全な
医療環境をサポートします。



プラネクタ付延長チューブ

規格追加のご案内

輸液ライン準備・管理における問題解決のお手伝いをさせていただきます。

- 複数のデバイスや延長チューブをつなげていて大変・・・
- 在庫点数・種類が多く取り違えるケースがある・・・
- 接続箇所が多く、緩んだり、外れたりする・・・
- 他のデバイスも検討してみたい・・・

シンプルなニードルレスデバイス一体型の延長チューブを使用することで問題を低減することができます。(条件に応じたカスタマイズについてもご相談ください)



輸液セットと一回の接続で、プラネクタ(ニードルレスデバイス)をお使いいただけます

■ 先端形状



フリー
ロック



PN
ロック

フリーロックとPNロック規格を取り揃えています。

「プラネクタ輸液ラインシステム」



Point
1

消毒しやすい形状

凹凸のないフラットでワイドな形状のためアクセス前の消毒を容易に行えます。
(しっかりと2回消毒)


Point
2

ノーデッドスペース

輸液中における「薬液だまり」や「エアだまり」のできにくい構造により、輸液管理の様々なリスクを低減します。

一方弁

プラネクタ上部には、一方弁を組み込み、薬液を注入した際に、確実に患者様側へ薬液が流れる構造になっています。三方活栓使用時における複雑なコック操作が不要です。

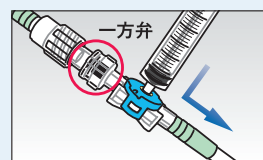

金属針や専用のカニューラを必要とせず、ルアータイプのシリンジでアクセスが可能です。(プラネクタの接続には、注射針を使用しないでください。)



持続注入を行う場合は、PNロック付輸液セット、PNロック付延長チューブで接続を行ってください。



プレフィルドシリンジ、ロックシリンジでのアクセスは専用の「アクセスアダプタ」を接続して行ってください。

アクセスアダプタ



販売名:アクセスアダプタ
品番:JV-AANG
医療機器届出番号:34B1X00001000071

販売名称	品番	JAN	型式・規格		入数	
JMS延長チューブ	JV-PWP205F1E	4987494269006	PVCフリー PB2 550mm	フリーロック PN×1 ワンウェイ×1	25本/箱	500本/ケース
JMS延長チューブ	JV-PWP205P1E	4987494269013	PVCフリー PB2 550mm	PNロック PN×1 ワンウェイ×1	25本/箱	500本/ケース
JMS延長チューブ	JV-PWP205F2E	4987494269020	PVCフリー PB2 570mm	フリーロック PN×2 ワンウェイ×1	25本/箱	500本/ケース
JMS延長チューブ	JV-PWP205P2E	4987494269037	PVCフリー PB2 570mm	PNロック PN×2 ワンウェイ×1	25本/箱	500本/ケース



製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
〒730-8652 広島市中区加古町12番17号