



## 【使用上の注意】

### <重要な基本的注意>

- ・ 本製品は専用の経腸栄養用輸液ポンプ「経腸栄養ポンプ Amika」に接続して使用すること。
- ・ 血管系ラインとの接続はしないこと。[血管に経腸栄養ラインに投与されるべき内服液剤が投与され、重篤な症状になるおそれがある。]
- ・ 本製品を24時間以上使用しないこと。
- ・ 本製品を40度以上の温度にさらさないこと。
- ・ 本製品を在宅治療等で使用する場合には、本製品の使用方法、使用上の注意を医療機関から患者および家族等、本製品を取り扱う者に指導して下さい。
- ・ 万一、破損など本製品に異常が認められた場合は、使用しないで下さい。
- ・ 本製品は鋭利なものへの接触は避け、丁寧にご使用下さい。[鋭利なものへの接触及び乱暴な取り扱いが本製品を傷つける可能性がある。]
- ・ チューブを鉗子等でつまんで傷付けないように注意して下さい。[液漏れ、空気の混入、破損等が生じる場合がある。]
- ・ TPNラインとの誤接続に注意して下さい。
- ・ 使用中は、本製品の破損、液漏れ等について定期的に確認し、異常が認められた場合には、直ちに担当医師の指導に従って下さい。
- ・ 栄養剤等の投与中は、投与状態（点滴の落下状態、点滴筒内の液面の高さ、栄養剤等の減り具合）を定期的に確認して下さい。
- ・ 冷所での使用はお避け下さい。[上部閉塞アラームが発生することがあります。]

## 【保管方法及び有効期間等】

### <保管方法>

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管して下さい。

### <有効期間>

使用期限は、包装に記載（自己認証による）。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

### <製造販売業者>



フレゼニウスカービジャパン株式会社  
<https://www.fresenius-kabi.com/jp/>

### <製造業者>

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Plant Bad Hersfeld  
(ドイツ)

### <販売業者>

株式会社ジェイ・エム・エス  
電話番号：03-6404-0601