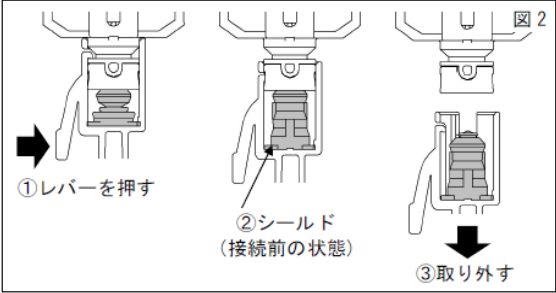


- ネオシールドレバーロック、ネオシールド輸液セット、ネオシールドスパイクコネクタ、ネオシールドコネクチューブ

※段落番号や図番号は、添付文書毎に異なります（下表はネオシールドレバーロックの例となります）。

改訂後（追加箇所 _____）	改訂前（削除箇所 _____）
<p>【使用方法等】 <使用方法等に関連する使用上の注意> <u>(2)閉鎖式レバーロックの接続を外す際は、次の事項に注意すること。</u> 1)レバーを押すこと(図 2①)。[レバーを押さずに引っ張ると破損するおそれがある。] 2)シールドが接続前の状態に戻ったことを確認し(図 2②)取り外すこと(図 2③)。[シールドが接続前の状態に戻るより早く閉鎖式レバーロックを外した場合、液漏れが生じるおそれがある。]</p> 	<p>【使用方法等】 <使用方法等に関連する使用上の注意> (記載なし)</p>

改訂理由

ネオシールドトランスファーにおいて、バグアダプタ接続部の接続を外す際、微量の液漏れが生じた事例が報告されたことから、改訂いたしました。また、同様の接続部を有する関連製品についても、改訂いたしました。

対象製品

販売名：ネオシールドトランスファー
 ネオシールドレバーロック
 ネオシールド輸液セット
 ネオシールドスパイクコネクタ
 ネオシールドコネクチューブ

❖ 対象製品の詳細は別紙をご確認ください。

変更時期

2018年1月29日生産ロット以降順次変更いたします。

その他

最新の添付文書情報は、以下のホームページに掲載されますので、併せてご参照ください。

- 弊社ホームページ (URL: <http://www.jms.cc/>)
- 医薬品医療機器総合機構情報提供ホームページ (URL: <http://www.pmda.go.jp/>)

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

ホスピタルプロダクツビジネスユニット営業部

TEL 03-6404-0601

対象製品一覧

販売名：ネオシールドトランスファー

品番	型式	JAN
JV-NSTF	トランスファー	4987494245895

販売名：ネオシールドレバーロック

品番	型式	JAN
JV-NSLL	レバーロック	4987494245925

販売名：ネオシールド輸液セット

品番	型式	JAN
JP-NFP322P3NS	DEHPフリー IVF PN(W)×2	4987494265763
JP-NFP322F3NS	DEHPフリー IVF PN(W)×2	4987494265756
JY-NFP322F3NS	DEHPフリー IVF PN(W)×2	4987494265732
JY-NFP322P3NS	DEHPフリー IVF PN(W)×2	4987494265749
JP-NP322P3NS	DEHPフリー PN(W)×2 ポンプ用	4987494262465
JP-NP322F3NS	DEHPフリー PN(W)×2 ポンプ用	4987494262458
JP-NP322F3NSP	DEHPフリー PN×1 NSP×1	4987494284771
JY-NP322F3NS	DEHPフリー PN(W)×2	4987494262434
JY-NP322P3NS	DEHPフリー PN(W)×2	4987494262441
JY-NP322F3NSP	DEHPフリー PN×1 NSP×1	4987494284764
JP-NX320FNS	DEHPフリー ポンプ用	4987494267217
JY-NX320FNS	DEHPフリー	4987494267200
JP-NXL23PNS	DEHPフリー ポンプ用	4987494261741
JP-NXL23FNS	DEHPフリー ポンプ用	4987494261758
JY-NXL23FNS	DEHPフリー	4987494263127
JY-NXL23PNS	DEHPフリー	4987494263165
JP-NFL20P2NS	DEHPフリー IVF	4987494261789
JP-NFL20F2NS	DEHPフリー IVF	4987494267897
JY-NFL20F2NS	DEHPフリー IVF	4987494263141
JY-NFL20P2NS	DEHPフリー IVF	4987494263172
JP-NF320F2NS	DEHPフリー IVF	4987494288434
JY-NF320F2NS	DEHPフリー IVF	4987494288649

販売名：ネオシールドスパイクコネクタ

品番	型式	JAN
JV-NSSCD	スパイクコネクタ	4987494279128
JV-NSSC	スパイクコネクタ	4987494279029

販売名：ネオシールドコネクチュリーブ

品番	型式	JAN
JV-NS240FCLL	DEHPフリー NSコネクチュリーブ	4987494261734