

JMS血液ポンプシステム 使用方法のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、JMS血液ポンプシステムの使用方法につきまして、下記のとおり、ご案内申し上げます。今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白


記

モジュールユニットとベースユニットのドッキングについて

医療機関から使用中にモジュールユニットが再起動又はシャットダウンしたとの報告を受け、調査した結果、モジュールユニットとベースユニットの不完全なドッキング及びモジュールユニット内蔵バッテリーの充電状態が原因であると推察されました。

【ご使用に際してのお願い】

1.モジュールユニットは次の手順で確実にベースユニットに取り付けてください。

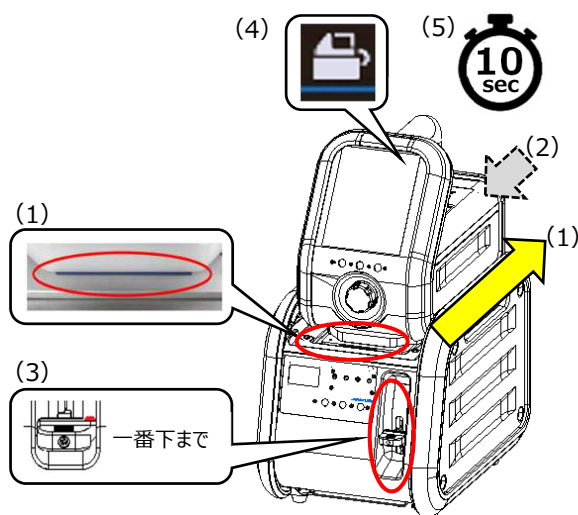

- (1) モジュールユニットをベースユニットの青色のラインが見えるまで押し込みます。
- (2) モジュールユニットが引き出す方向に動かないことを確認します。
- (3) ドッキングレバーをドッキング ON 位置（赤色）の一番下まで確実に引き下げてドッキングを完了させます。
- (4) モジュールユニットの画面右上に接続ステータスが点灯したことを確認します。
- (5) その後約 10 秒間はモジュールユニットとベースユニットの分離を行わないでください。

2. 使用前及び点検時にモジュールユニットの内蔵バッテリー残量が満充電状態であることを確認してください。

【モジュールユニット天面パネル】




外部補助バッテリーの接続方法について

医療機関から使用中に外部補助バッテリーを取り外したところ、モジュールユニットの電源がシャットダウンしたとの報告を受け、調査した結果、外部補助バッテリーの接続方法が原因であると判明しました。

【ご使用に際してのお願い】

外部補助バッテリーは AC アダプタを接続した状態でモジュールユニットに接続しないでください。接続して使用するとモジュールユニットの内蔵バッテリー残量を監視せず、また、装置が故障するおそれがあります。

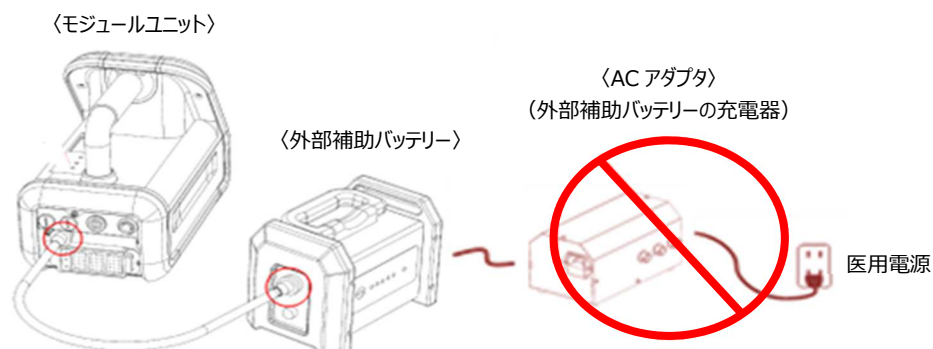

対象規格

販売名：JMS血液ポンプシステム

医療機器承認番号：22700BZX00079000

品名	品番	JANコード
ECMOVAモジュールユニット	WJMS00001	4987494280513
ECMOVAベースユニット	WJMS00002	4987494280612
ECMOVA外部補助バッテリー	WJMS00004	4987494280636

尚、取扱説明書及び電子添文を改訂いたしますので、詳細は別紙をご参照ください。

以上