



JMS 多用途透析装置についてのご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、JMS多用途透析装置の内部設定につきまして、下記のとおり、ご案内申し上げます。今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

内部設定について

JMS多用途透析装置の各種内部設定は、最適な動作となるよう工場出荷時に初期設定しております。

各種内部設定のうち、特にプライミングに関連した以下の内部設定を初期設定値から減少させた場合、ダイライザや血液回路の洗浄不足、リークチェック機能が働かない等、意図しない動作となるおそれがあります。

初期設定値から減少させる場合は、事前に弊社担当者までお問合せいただきますようお願いいたします。

プライミング方法	内部設定	初期設定値
逆濾過自動	両側工程逆濾過量	2,000mL
オンライン自動	両側工程補充液量	2,000mL

対象製品

販売名	医療機器承認番号
JMS個人用透析装置 SD-300N	22000BZX00733000
JMS透析用コンソール GC-110N*	21700BZZ00191000

*ソフトウェア Ver.1.10 以降

以上

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

サージカル&セラピービジネスユニット 血液浄化部

TEL 03-6372-9120