

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
管理医療機器 非天然ゴム製手術用手袋 40549000

フィネシス ゼロ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

左手用及び右手用を一組にしたものである。

	項目	内容
分類	形状	C（曲指形）
	表面仕上げ	T（粗面）
原材料	基材	熱可塑性エラストマー
	内層コート	アクリルポリマー
パウダ		なし
加硫促進剤		なし

【使用目的又は効果】

医科及び歯科の手術において、患者及び使用者を交差感染から保護する。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、台紙ごと手袋を取り出します。
2. 台紙の折り返し部分をつまんで開き、手袋を取り出して装着します。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 本品に含まれる化学物質により、遅延型アレルギー性接触皮膚炎の症状を引き起こすことがある。体質によっては、かゆみ、発疹等を起こすおそれがある。このような症状が現れた場合は、使用を中止し適切な処置を行うこと。また、その後の使用に際しては慎重を期すこと。
2. 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりするおそれがあるので確認の上、使用すること。

〈不具合・有害事象〉

1. その他の不具合
浸透、膨潤
2. その他の有害事象
かゆみ、発疹

【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

3年〔自己認証（当社データ）による〕
包装の使用期限欄を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先

TEL 0120-923-107

製造業者

センチエンクス社 (Sentienx Sdn Bhd)

国名：マレーシア