

JMS

人と医療のあいだに…

JMS医療用ペコぱんだ




Orarize
オーラライズ

JMS医療用ペコぱんだは、 口腔や嚥下の機能の低下に対して行う リハビリテーションに使用する訓練器具です。


使用方法




使用する前に、訓練部を指で2~3回押し潰します。

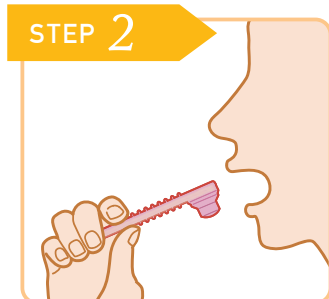

把持部に手を持ち、訓練部の凸部を舌の方に向け、口腔内に挿入します。

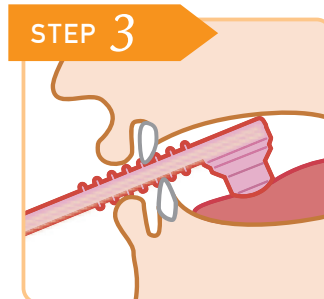

位置決め部を上下の前歯で軽く挟み、訓練部の口腔内舌上での位置を決めます。

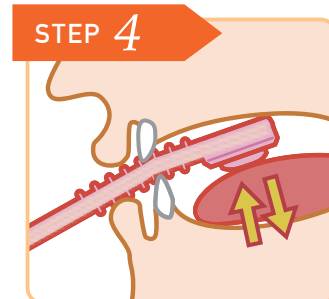

舌を上下させ、訓練部を繰り返し押し潰します。

規格一覧

品番	型式	規格	硬さ	JANコード	外箱入数
JF-MTTB	舌圧トレーニング用具 SS	ブルー 5個入	極めて軟らかめ	4987494321377	12箱
JF-MTTP	舌圧トレーニング用具 S	ピンク 5個入	軟らかめ	4987494321988	
JF-MTTV	舌圧トレーニング用具 MS	バイオレット 5個入	やや軟らかめ	4987494321995	
JF-MTTG	舌圧トレーニング用具 M	グリーン 5個入	普通	4987494322008	
JF-MTTO	舌圧トレーニング用具 MH	オレンジ 5個入	やや硬め	4987494356812	
JF-MTTY	舌圧トレーニング用具 H	イエロー 5個入	硬め	4987494322015	

仕様一覧

項目	内容
一般的名称	口腔・嚥下機能訓練器具
販売名	JMS医療用ペコぱんだ
医療機器届出番号	34B1X00001000110
クラス分類	I(一般医療機器)
原材料	スチレン系熱可塑性エラストマー
重量	約9g
押し潰し強度*	SS:舌圧 5kPa 相当 S:舌圧 10kPa 相当 MS:舌圧 15kPa 相当 M:舌圧 20kPa 相当 MH:舌圧 25kPa 相当 H:舌圧 30kPa 相当
耐用期間	使用開始後2カ月
同梱品	携帯用ケース

※JMS舌圧測定器(承認番号22200BZX00758000)の舌圧値に基づく



製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス

〒730-8652 広島市中区加古町12番17号
お問い合わせ先
カスタマーサポートセンター
☎ 0120-923-107 csc@jms.cc