

レーザ血流計「ポケット LDF」 Viewer セットアップ手順

2021.03.31

JMS Co., Ltd.



Copyright©2021 JMS Co., Ltd. all rights reserved.

目次

1. フォルダを解凍する.....	2
2. ショートカットを作成する.....	2
3. アプリケーションを起動する.....	3
4. 各種設定を行う.....	4

1. フォルダを解凍する


「レーザ血流計「ポケットLDF」Viewer」(圧縮ファイル:JMS_Viewer.zip)を任意のフォルダに格納します。
「JMS_Viewer.zip」ファイルを右クリックし、「全て展開」を選択して解凍します。
解凍すると、解凍したフォルダ配下に「JMS_Viewer」フォルダが作成されます。
上記フォルダ確認後、「JMS_Viewer.zip」ファイルを削除します。

2. ショートカットを作成する

解凍すると、「JMS_Viewer」フォルダ配下に以下のようにコンテンツが展開されますのでご確認ください。

コンテンツ
Exe
「ポケットLDF」Viewer_ショートカット作成.vbs

「「ポケットLDF」Viewer_ショートカット作成.vbs」ダブルクリックすると、デスクトップに「「ポケットLDF」Viewer」のショートカットが作成されます。

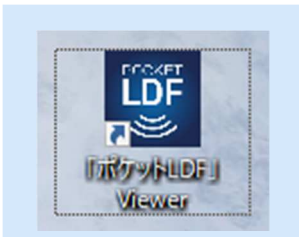


3. 拡大縮小とレイアウトを設定する

デスクトップの何もないところで右クリックし、メニューの「ディスプレイ設定」を選択します。



レーザ血流計「ポケット LDF」Viewer セットアップ手順書


ディスプレイ設定画面の「拡大縮小とレイアウト」が「100%」になっていることを確認します。
他設定になっている場合はアプリケーションを起動する前に「100%」に設定してください。

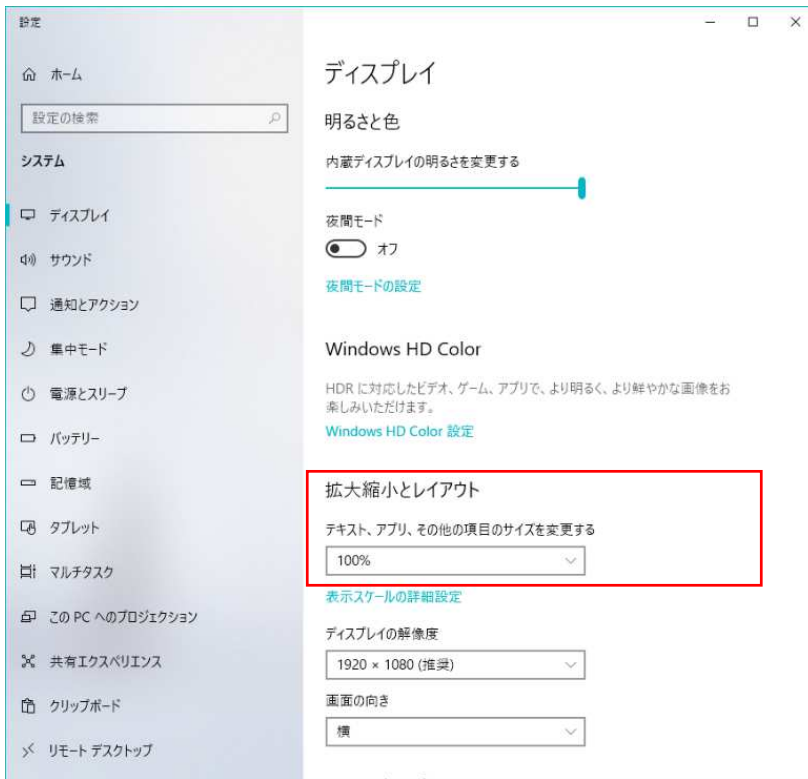

4. アプリケーションを起動する

デスクトップに作成された「「ポケット LDF」Viewer」のショートカットをダブルクリックすると「レーザ血流計「ポケット LDF」Viewer」画面が起動します。

※以下のような確認メッセージが表示された場合、詳細情報をクリック後に表示される「実行する」ボタンを押下してください。

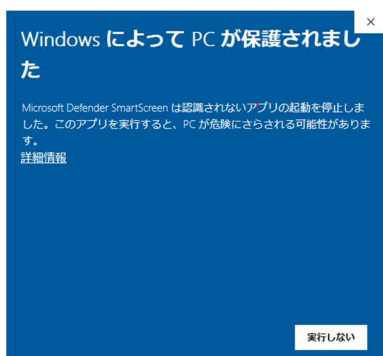

5. 各種設定を行う

「レーザ血流計「ポケットLDF」Viewer」メニュー画面の「ヘルプ」を押下し、「操作マニュアル」に沿って、各種設定を行います。



フットチェック

血流測定
シングルモニタ

血流測定
デュアルモニタ

VAR index 測定

研究測定

VVR

その他

各種設定

測定結果

※初期状態では、必ずデバイス設定を行う必要があります。（「メニュー」-「各種設定」-「デバイス設定」）

※グラフ数値、グラフカラー、グラフマーカー、コメント初期値など、任意で設定できます。

設定項目の詳細は操作マニュアルをご参照ください。