

お客様各位



株式会社 ジェイ・エム・エス

パウダー付き医療用手袋に関するご案内

謹啓 平素よりJMS製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「パウダー付き医療用手袋に関する取扱いについて」(平成28年12月27日付け薬生機審発1227第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長・薬生安発1227第1号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長連名通知)に基づきまして、下記のとおりご案内申し上げます。ご不明な点がございましたら弊社営業担当者までお問い合わせください。

今後とも弊社製品のご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

■ 対象製品及び推奨代替製品

パウダー付き手袋につきましては、平成30年12月末までに、順次パウダーフリー手袋へ切替えを行います。対象製品及び推奨代替製品は以下のとおりです(詳細は裏面をご参照ください)。なお、販売終了時期の詳細につきましてはあらためてご案内申し上げます。

	販売名		一般的名称
	【対象製品(パウダー付き手袋)】	【推奨代替製品(パウダーフリー手袋)】	
①	マイクロ・シン	マイクロ・シン パウダーフリー	天然ゴム製手術用手袋
②	ガメックス (一部規格2016年製造販売終了)	ガメックス パウダーフリー	
③	アンセルイグザミネーショングローブ (2012年製造販売終了)	アンセルイグザミネーショングローブ	天然ゴム製検査・検診用手袋
④	プラスチックグローブ F	プラスチックグローブ F	非天然ゴム製検査・検診用手袋
⑤	プラスチックグローブ (2015年製造販売終了)		
⑥	JMSビニールグローブ E (2015年製造販売終了)		

■ パウダー付き医療用手袋のご使用に際して

パウダー付き医療用手袋をご使用になる場合には、以下にご留意くださいますようお願い申し上げます。

	販売名	【ご使用に際して】
①	マイクロ・シン	(天然ゴム製のもの) 手袋に付いているパウダーは、天然ゴムタンパクのアレルゲンのキャリアとなり、まれにアレルギーを誘発する可能性があることや、肉芽腫や術後癒着の形成リスクを高めるおそれがあることが報告されているので、リスクを考慮して本品の使用を検討すること。
②	ガメックス	
③	アンセルイグザミネーショングローブ	
④	プラスチックグローブ F	(非天然ゴム製のもの) 手袋に付いているパウダーは、肉芽腫や術後癒着の形成リスクを高めるおそれがあることが報告されているので、リスクを考慮して本品の使用を検討すること。
⑤	プラスチックグローブ	
⑥	JMSビニールグローブ E	

■ 対象製品及び推奨代替製品

【対象製品(パウダー付き手袋)】		
①販売名:マイクロ・シン		
品番	型式	JANコード
JG-MTB55	B 5・1/2	4987494015702
JG-MTB60	B 6	4987494015719
JG-MTB65	B 6・1/2	4987494015726
JG-MTB70	B 7	4987494015733
JG-MTB75	B 7・1/2	4987494015740
JG-MTB80	B 8	4987494015757
JG-MTB85	B 8・1/2	4987494015764
JG-MTSP55	SP 5・1/2	4987494266692
JG-MTSP60	SP 6	4987494266708
JG-MTSP65	SP 6・1/2	4987494266715
JG-MTSP70	SP 7	4987494266722
JG-MTSP75	SP 7・1/2	4987494266739
JG-MTSP80	SP 8	4987494266746
JG-MTSP85	SP 8・1/2	4987494266753

【推奨代替製品(パウダーフリー手袋)】		
①販売名:マイクロ・シン パウダーフリー		
品番	型式	JANコード
JG-MTUGSP55	SP 5・1/2	4987494266838
JG-MTUGSP60	SP 6	4987494266845
JG-MTUGSP65	SP 6・1/2	4987494266852
JG-MTUGSP70	SP 7	4987494266869
JG-MTUGSP75	SP 7・1/2	4987494266876
JG-MTUGSP80	SP 8	4987494266883
JG-MTUGSP85	SP 8・1/2	4987494266890

②販売名:ガメックス (※)・・・2016年製造販売終了)		
品番	型式	品番
JG-GX55(※)	5・1/2	4987494801428
JG-GX60(※)	6	4987494801435
JG-GX65(※)	6・1/2	4987494801442
JG-GX70(※)	7	4987494801459
JG-GX75(※)	7・1/2	4987494801466
JG-GX80(※)	8	4987494801473
JG-GX85(※)	8・1/2	4987494801480
JG-GXSP55	SP 5・1/2	4987494266555
JG-GXSP60	SP 6	4987494266562
JG-GXSP65	SP 6・1/2	4987494266579
JG-GXSP70	SP 7	4987494266586
JG-GXSP75	SP 7・1/2	4987494266593
JG-GXSP80	SP 8	4987494266609
JG-GXSP85	SP 8・1/2	4987494266616

②販売名:ガメックス パウダーフリー		
品番	型式	JANコード
JG-GXPFSP55	SP 5・1/2	4987494266623
JG-GXPFSP60	SP 6	4987494266630
JG-GXPFSP65	SP 6・1/2	4987494266647
JG-GXPFSP70	SP 7	4987494266654
JG-GXPFSP75	SP 7・1/2	4987494266661
JG-GXPFSP80	SP 8	4987494266678
JG-GXPFSP85	SP 8・1/2	4987494266685

③販売名:アンセルイグザミネーショングローブ (2012年製造販売終了)		
品番	型式	品番
JG-EXSX	S	4987494808649
JG-EXMX	M	4987494808656
JG-EXLX	L	4987494808663

③販売名:アンセルイグザミネーショングローブ		
品番	型式	JANコード
JG-EXPFSSX	パウダーフリー	4987494077489
JG-EXPFMX	パウダーフリー	4987494077496
JG-EXPFLLX	パウダーフリー	4987494077502

④販売名:プラスチックグローブ F		
品番	型式	品番
JG-PGXSS	SS	4987494255702
JG-PGX S	S	4987494255696
JG-PGX M	M	4987494255719
JG-PGX L	L	4987494255726

④⑤⑥販売名:プラスチックグローブ F		
品番	型式	JANコード
JG-PGXPFSS	SS パウダーフリ	4987494255733
JG-PGXPF S	S パウダーフリ	4987494255740
JG-PGXPF M	M パウダーフリ	4987494255757
JG-PGXPF L	L パウダーフリ	4987494255764

⑤販売名:プラスチックグローブ(2015年製造販売終了)		
品番	型式	品番
JG-VJASX	S	4987494191369
JG-VJAMX	M	4987494191352
JG-VJALX	L	4987494191345

⑥販売名:JMSビニールグローブ E(2015年製造販売終了)		
品番	型式	品番
JG-VESSX	SS	4987494057719
JG-VESX	S	4987494057757
JG-VEMX	M	4987494057771
JG-VELX	L	4987494057931

以上