

JMS 多用途透析装置等についてのご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、JMS多用途透析装置等の透析用血液回路のプライミング操作（オーバーフローライン使用時）方法につきまして、あらためまして下記の通り、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

ご使用に際してのお願い


1. オーバーフローライン使用時のプライミング操作方法

- (1) オーバーフローラインが自動プライミング用クランプに確実にセットされていることを確認してください。確実にセットされていない場合、血液漏れ、空気混入を生じる可能性があります。
- (2) プライミング動作完了後、透析用血液回路内が正常にプライミングされていることを確認し、オーバーフローラインを鉗子等で閉塞してください。閉塞されていない場合、血液漏れ、空気混入の可能性があります。

2. 透析装置のリークテスト機能使用下における警報発生時の対応方法

- (1) リークテスト機能使用時にプライミング設定警報が発生した場合は、取扱説明書に従って、「再開」又は「脱血再開」スイッチを押して再開してください。

【画面代表例（JMS透析用コンソール GC-X01）】

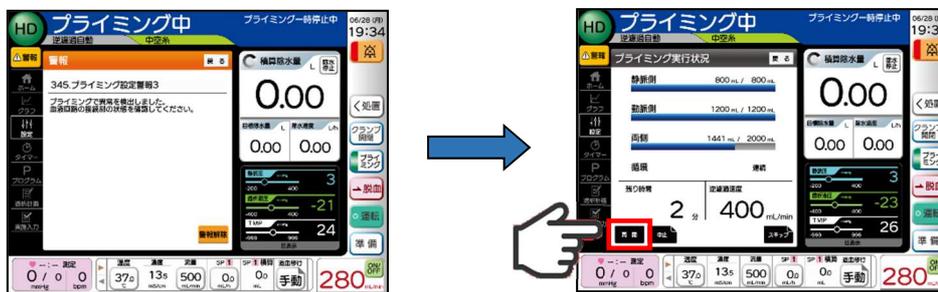

対象製品

別紙をご参照ください。

以上

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

サージカル&セラピービジネスユニット 血液浄化部

TEL 03-6404-0602

販売名	医療機器承認番号
JMS透析用コンソール GC-X01	22900BZX00114000
JMS透析用コンソール GC-300*	22000BZX01184000
JMS個人用透析装置 SD-300N	22000BZX00733000
JMS個人用透析装置 SD-300*	22000BZX00733000
JMS透析用コンソール GC-110N	21700BZZ00191000
JMS透析用コンソール GC-210*	21500BZZ00599000
JMS透析用コンソール GC-200	21400BZZ00058000
JMS透析用コンソール GC-110	21100BZZ00038000
JMS透析用コンソール GC-10	21100BZZ00038000
JMS透析用コンソール GC-100	20900BZZ00426000

*：スイッチは「再開」スイッチではなく、「脱血再開」スイッチとなります。