



JMS血液ポンプシステム 起動方法のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、JMS血液ポンプシステムの外部コントロールパネル使用時の起動方法につきまして、あらためまして下記のとおり、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

ご使用に際してのお願い

外部コントロールパネルを使用する場合は、取扱説明書に従って、以下の順に起動してください。

1. ベースユニットの電源スイッチがOFFの状態、AC電源ケーブルを医用電源に接続する。
2. 外部コントロールパネルの接続ケーブルをベースユニット背面の外部コントロールパネル用コネクタに接続する。
3. ベースユニットの電源スイッチをONにした後、モジュールユニットの主電源スイッチを長押しする。

対象規格

販売名：JMS血液ポンプシステム

医療機器承認番号：22700BZX00079000

品名	品番	JANコード
ECmoVAモジュールユニット	WJMS00001	4987494280513
ECmoVAベースユニット	WJMS00002	4987494280612
ECmoVA外部コントロールパネル	WJMS00003	4987494280629

以上