

disposable Face Shield

フェイスシールド



※フェイスシールドを上げた状態で固定してご使用いただけます。

- 高透明PET (厚さ0.25mm) を用いることでクリアな視界を実現
 - ワンタッチで組み立てられる簡単設計
 - 額に接触する部分には汗止めのシート


備蓄にも最適なコンパクト設計

オリジナルのコンパクト設計 (特許・意匠登録申請中) により、場所をとることなくストックが可能です。


組み立て方

- 1 矢印の方向へ
バンドを引っ張ります。


シールドの切れ込みに
バンドの凹み部分がはまります。

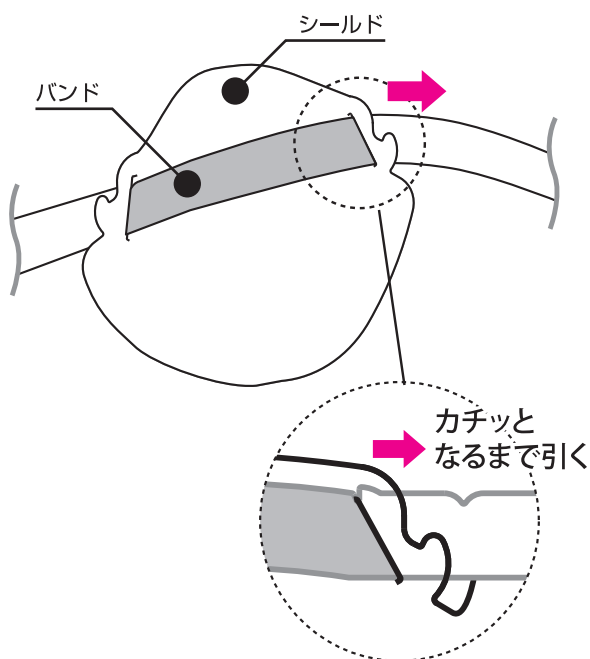

- 2 頭に装着した状態で
バンドを矢印の方向へ引っ張ります。

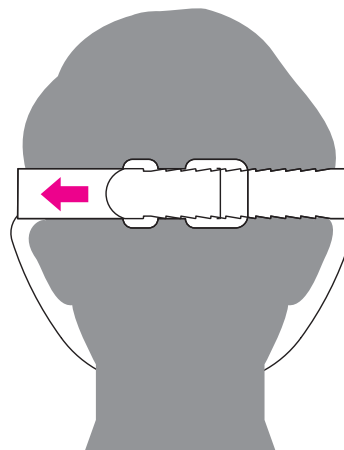

- 3 長さの調節ができれば
隣の穴へバンドを差し込みます。

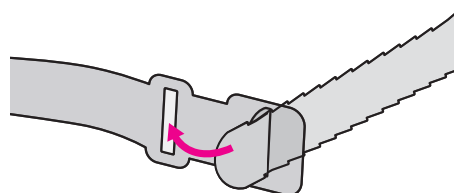

使用上の注意

- 本品は微小な粉塵や水滴などの飛沫が顔にかかるのを防ぐことを目的としていますが、ウイルスを完全に防ぐものではありません。
- シールドに傷・汚れなどがあると視界を遮られ、思わぬ事故を引き起こす原因となりますのでご使用をおやめください。
- 本品のフチで肌や目を傷つけないようご注意ください。
- 運転時・睡眠時のご使用はおやめください。
- 火気の近くでのご使用はおやめください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光が当たる場所や、高温になる場所を避け保管してください。
- 本品を廃棄する場合は、お住まいの市町村の区分にしたがってください。

規格・仕様

品名	品番	材質・色	サイズ	最小販売単位
フェイスシールド	FS-1	シールド：再生PET0,25mm 額部分：ポリオレフィンフォーム (商品名：PEライトZ AZOTE LD-15 白)	302×254mm ※シールド部	200枚/箱