

血液成分分離バッグ

セルエイド[®] Pタイプ



完全閉鎖系で
血小板等を含む血漿を
シンプル操作で
分離可能

セルエイド® Pタイプ

完全閉鎖系

完全閉鎖系で血小板等を含む血漿の分離ができるため、細菌汚染などのリスクを低減できます。


血小板等を含む血漿が調製可能

抗凝固化血 20mL から 2mL の血小板等を含む血漿を調製可能です。

シンプル操作

抗凝固化血を注入し、2回遠心分離するだけのシンプル操作で、およそ60分で調製できます。専用遠心機は不要です。

■ 分離・調製の操作手順

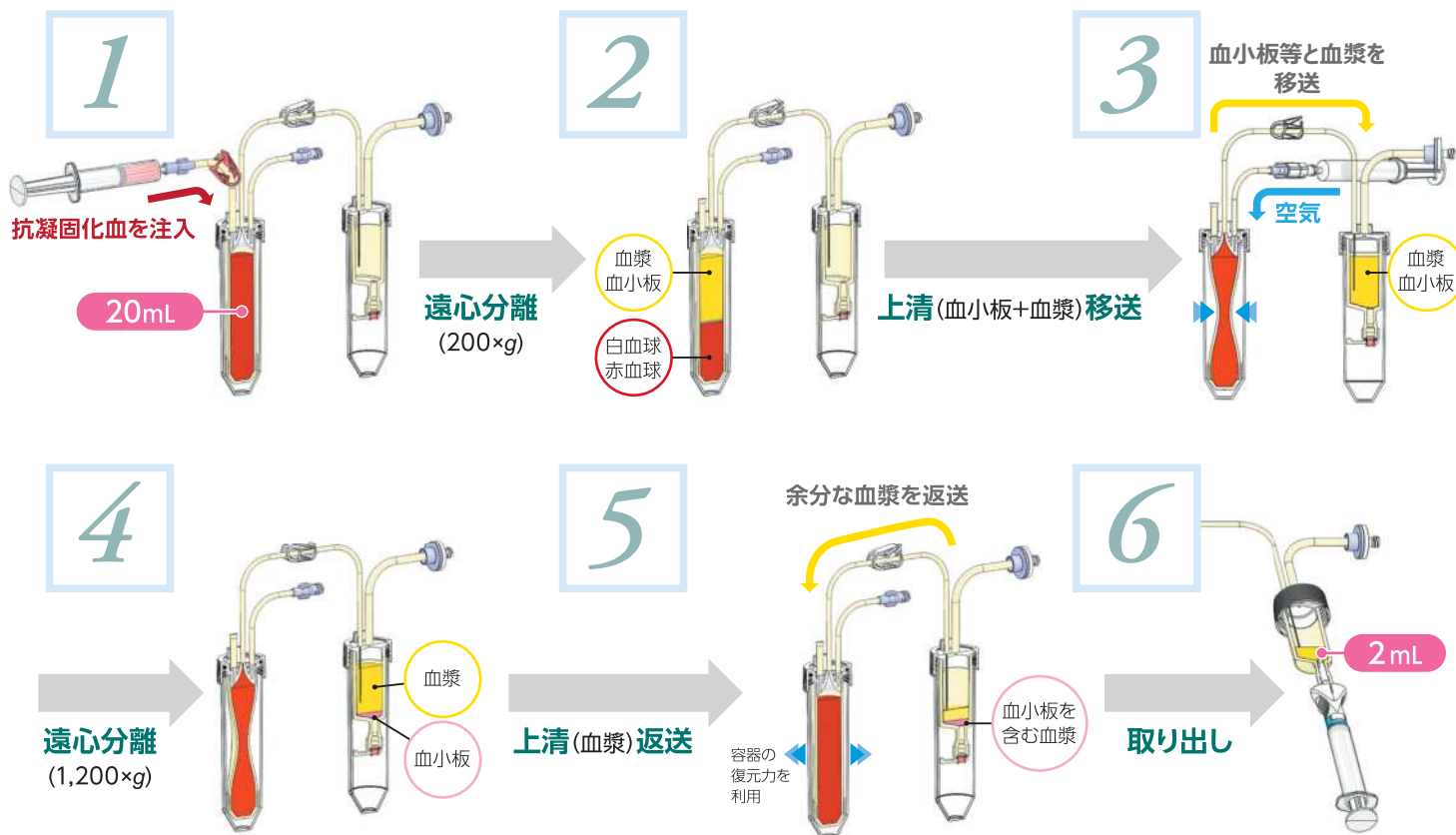

■ 製品仕様

抗凝固化血量	20mL	必要物品 (別売)	50mL遠心管	
滅菌方法	高圧蒸気滅菌		チューブシーラ	
使用期限	3年		採血器具	
販売名	セルエイド Pタイプ		シリンジ	
規格一覧	品番		JB-PT20CSA	遠心分離機 (スイングロータータイプ) ※専用遠心機は不要です
	JAN コード		4987494298914	びん針
	最終調製量	2mL	例) プラネクタ (バイアルアクセス) 品番: JV-PNS01B 販売名: プラネクタ 医療機器承認番号: 21100BZZ00335000	
	入数/箱	4セット×2箱=8セット		
医療機器認証番号	229AABZX00064000			

※セルエイドは株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。

※製品の仕様及び外観は、品質・性能改良のため予告なく変更することがあります。



製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
<https://www.jms.cc/>

■お問い合わせ先
ブラッドマネジメント&セルセラピービジネスユニット営業部
【カスタマーサポートセンター TEL0120-923-107】